

VACUAIDE 7325

**LEICHT.
LANGLEBIG.
EFFIZIENT.**



LEICHT. LANGLEBIG. EFFIZIENT.

Die **SEKRETABSAUGPUMPE VACUAIDE 7325**, hergestellt in den USA, überzeugt durch ihre einfache Handhabung, hohe Langlebigkeit und eine effiziente Nutzung.



ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG IN DER ABSAUGTHERAPIE

Seit **mehr als 50 Jahren** entwickelt unser Ingenieur-Team in den USA hochzuverlässige Geräte für die Sekretabsaugung. Bei der Konzeption neuer Medizingeräte richten wir uns an den **Bedürfnissen unserer Kunden und Anwender** aus. Deshalb wurde die VacuAide 7325-Serie nicht nur mit einem Schlauchhalter zur hygienischen Ablage des Saugschlauchs ausgestattet, sondern auch mit einem **Lithium-Ionen-Akku**.

Dadurch weist die 7325-Serie im Vergleich zu anderen VacuAide Modellen eine signifikant **verbesserte Akkuladezeit** auf.

VACUAIDE 7325: MEHR PLUSPUNKTE



FLEXIBLE SAUGLEISTUNG

Ein **breiter Absaugbereich** von 50 bis 550 mmHg bei 27 l/min Flussrate

HYGIENISCHE ABSAUGUNG

Ein **ausgeklügeltes Sicherheitssystem** verhindert ein Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät

WARTUNGSFREI

Alle **DeVilbiss by Drive** VacuAide-Modelle sind wartungsfrei

LANGLEBIGER AKKU

Modernste Technologie in Form eines **Lithium-Ionen-Akkus**

ZAHLREICHE VORTEILE

Schlauchhalter - Hygienische Ablage nach der Absaugung

Zwei weitere **Sekretbehälter-Varianten** optional verfügbar

Vakuumregler im stoßgeschützten Manometer integriert

LED-Kontrollleuchten auf der Geräteoberseite - wichtige Ladestandinformationen auf einen Blick



ENTLEERUNG DES SEKRET-BEHÄLTERS

VacuAide Sekretabsaugpumpen haben sich im täglichen Umgang als besonders **anwenderfreundlich** bewährt. Anwender räumen hierbei dem Aspekt eines sicheren und vor allem hygienischen Umgang mit dem Gerät einen besonders hohen Stellenwert ein. So Bedarf es z.B. **nur wenige Handgriffe**, um den Sekretbehälter für Reinigungszwecke zu entfernen.



- 1 Absaugschlauch in die Schlauchhalterung stecken.
- 2 Filterkartusche inklusive des kurzen Verbindungsschlauchs vom Deckel abziehen und zur Seite drehen.
- 3 Sekretbehälter mit beiden Händen unter leichten Hin- und Herbewegungen aus dem Gerätehalter ziehen.
- 4 Inhalt entleeren und Sekretbehälter gemäß Bedienungsanleitung reinigen.

LEICHT GEMACHT!



TASCHE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

Komplettiert wird der Lieferumfang der VacuAide 7325P durch die mitgelieferte Funktionstasche, in der das Gerät betrieben werden kann. Sichtfenster erlauben jederzeit die visuelle Kontrolle des Sekretstands.

Die wattierte Transporttasche ist als Schultertasche konzipiert und schützt das Gerät so vor äußeren Einflüssen. Ein zusätzliches Innenfach bietet Platz für Zubehör. Durch ihr unauffälliges Erscheinungsbild ist die VacuAide Funktionstasche der diskrete Begleiter in allen Situationen.

TECHNISCHE DATEN:

	Artikelnummer	HMV-Nr.
mit Akku, EU Stecker	7325P-I	01.24.02.1036
ohne Akku, EU Stecker	7325D-I	01.24.01.1027

	7325P-I	7325D-I
Maße (B x H x T)	17,8 cm x 17,5 cm x 18 cm	
Gewicht mit Zubehör	1,72 kg	1,54 kg

Luftstrom	27 l/min
Betriebsspannung (V)	240 V
Netzfrequenz (Hz)	60 Hz
Lagertemperatur	-40 °C – 70 °C
Vakuumbereich	50 mmHg – 550 mmHg



EIN ABSAUGBEHÄLTER FÜR JEDE SITUATION

Im **Standard-Lieferumfang** enthalten ist ein **800 ml-Sekretbehälter**, der für die Benutzung durch einen Patienten bestimmt ist. Optional ist ein **autoklavierbarer 1200 ml-Sekretbehälter** erhältlich. Im klinischen Umfeld, oder dort wo ein besonderer Schutz vor Kontamination erforderlich ist, empfehlen wir den Einsatz des mehrfach verwendbaren **Flovac® Sekretbehälters (Liner)** sowie des dazugehörigen Absaugbeutels zum Einmalgebrauch.

Für mehr Wirtschaftlichkeit und eine einfache Disposition, sind alle Sekretbehälter-Typen mit allen **DeVilbiss by Drive VacuAide**-Serien untereinander kompatibel.



Ihr Fachhändler:



Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny / Allgäu
info@drivemedical.de
www.drivemedical.de